

滅菌済

RACCOON

# ステリバッグ

IVH・混注・輸液・各製剤の病棟払い出し／在宅医療用に最適!



- 真空パック可能な袋です。従来品より強度があり、開封するまで真空を保持します。(誤開封・汚染防止)
- 酸素透過率、水蒸気透過率が低く、紫外線(UV)遮光により、薬液の品質劣化を防ぎます。(品質安定)
- 10枚単位を真空パックし、更に滅菌(ガンマー線)済みで、クリーンルーム・クリーンベンチ内でそのまま使用できます。(汚染防止)
- 使用時はフック取り出し口を開封し、フックを吊り下げることによりそのまま紫外線(UV)遮光・防塵の点滴カバーとなります。(1パックで2役)
- 開封は簡単なノッチ付きで、直線的に切ることができます(簡単)
- 卓上型・手動脱気シーラー(V-301)も用意しております。(即納)

## 【仕様】

型式	寸法(mm)	包装単位
SB-38	380×240	10枚／ 1パック×50 =500枚／箱
SB-48	480×300	
SB-50	500×340	
ローコスト版 SB-48NB*	480×300	

※紫外線透過率は若干大きくなります。

**使用方法**

- ① ノッチ部を手で引き裂いて開封する。  
上下両サイド(計4カ所)部に引き裂きやすいようにノッチ加工をしております。
- ② 頭の部分が出たら、フックにかけます。  
フックが出ないときは縦破線をカットして取り出してください。
- ③ 破線にそってカットする。
- ④ ノズルを取り出して完了です。  
下側破線をカットしノズルを取り出し使用する

フック側横破線をカットする

フックを取り出しスタンドにかける

製造販売元

**M 三田理化工業株式会社**

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2  
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : [sales@racoon.co.jp](mailto:sales@racoon.co.jp)

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393  
TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください!

