

滅菌済

RACCOON

ステリバッグ

IVH・混注・輸液・各製剤の病棟払い出し／在宅医療用に最適！



- 真空パック可能な袋です。従来品より強度があり、開封するまで真空を保持します。(誤開封・汚染防止)
- 酸素透過率、水蒸気透過率が低く、紫外線 (UV) 遮光により、薬液の品質劣化を防ぎます。(品質安定)
- 10枚単位を真空パックし、更に滅菌 (ガンマー線) 済みで、クリーンルーム・クリーンベンチ内でそのまま使用できます。(汚染防止)
- 使用時はフック取り出し口を開封し、フックを吊り下げることによりそのまま紫外線 (UV) 遮光・防塵の点滴カバーとなります。(1パックで2役)
- 開封は簡単なノッチ付きで、直線的に切ることができます (簡単)
- 卓上型・手動脱気シーラー (V-301) も用意しております。

【仕様】

型式	寸法 (mm)	包装単位
SB-38	380×240	10枚／ 1パック×50 =500枚／箱
SB-48	480×300	
ローコスト版 SB-48NB*	480×300	

*紫外線透過率は若干大きくなります。

使用方法

- ① ノッチ部を手で引き裂いて開封する。
上下両サイド (計4カ所) 部に引き裂きやすいようにノッチ加工をしております。
- ② 頭の部分が出たら、フックにかけます。
- ③ 破線にそってカットする。
フックが出ないときは縦破線をカットして取り出してください。
- ④ ノズルを取り出して完了です。
下側破線をカットしノズルを取り出し使用する

フック側横破線をカットする

フックを取り出しスタンドにかける

製造販売元

M 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102

mail : sales@racoon.co.jp

【ホームページ】

<https://www.racoon.co.jp/>

TEL : 06-6458-0971 FAX : 06-6458-2393
TEL : 03-3812-5371 FAX : 03-3812-5041

お気軽にお問い合わせください！



JQA-QMA16886